

# Geistlich Fibro-Gide®

## Manipulación a simple vista

**Diseño de colgajo** Use su colgajo de preferencia. Una amplia descarga es clave para una buena cicatrización con una cobertura completa de Geistlich Fibro-Gide® (cicatrización sumergida).




**Recortar para adaptar** Geistlich Fibro-Gide® puede ajustarse en tamaño y grosor con el objetivo de obtener el aumento deseado.



**Recorte preciso** La utilización de un bisturí contribuirá a obtener unos bordes suaves y biselados para una adaptación mejorada de la herida y un ajuste preciso de la matriz.



**Grosor** Puede ser recomendable reducir el grosor de Geistlich Fibro-Gide® a 2-3 mm próximo a los bordes de la herida para evitar dehiscencias durante la fase de cicatrización.

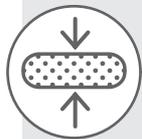

**Adherencia** Geistlich Fibro-Gide® pasa a ser adherente cuando se empapa de sangre y se mantiene en una posición estable una vez introducida. Suturar el producto al tejido blando subyacente no suele ser necesario.




**Cierre de heridas** Un cierre sin tensiones del colgajo es la clave de una cicatrización con éxito y sin complicaciones y la manera de evitar dehiscencias durante la fase de cicatrización.




**Curva de aprendizaje** Como sucede con cualquier producto nuevo, pasará por una curva de aprendizaje hasta que se acostumbre a las características de manipulación y al rendimiento del producto.




**Aplicación mínimamente invasiva** Las técnicas de tunelización y/o sobre aún se están investigando. Sin embargo, los datos actuales muestran una buena expectativa de Geistlich Fibro-Gide® con estas técnicas.

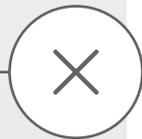

**Recorte en húmedo o en seco** Geistlich Fibro-Gide® puede recortarse tanto estando húmeda como seca mediante tijeras y/o un bisturí. Se recomienda el bisturí para la manipulación en seco.

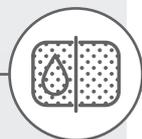

**Cambios volumétricos** Hay que tener en cuenta el aumento de volumen del producto húmedo al determinar sus dimensiones finales. El producto puede aumentar aprox. un 25% de volumen. Un colgajo amplio es clave para la cobertura completa de la matriz.

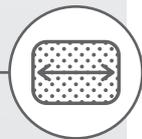

**Aplicación** Geistlich Fibro-Gide® puede aplicarse húmeda o seca en función de sus preferencias. La humectación previa puede realizarse con la sangre del paciente o con solución salina estéril.



**Adaptación in situ** Antes de cerrar la herida, el tamaño del producto debe evaluarse finalmente para obtener un cierre de la herida sin tensiones y una cobertura completa del producto.



**Cicatrización** La experiencia clínica muestra una incidencia baja de complicaciones en la cicatrización de las heridas<sup>3,18</sup>.



La información se basa en pruebas clínicas y preclínicas obtenidas durante la fase previa al lanzamiento de Geistlich Fibro-Gide®.